

NAVODILA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA ZA ANALIZO ELEMENTOV V SLEDOVIH

1. Namen in področje uporabe

Priporočila KIKKB so namenjena osebju UKCL.

2. Postopek

Epruvete za odvzem krvi

Epruvete morajo biti kemijsko čiste, namenjene za odvzem elementov v sledovih.

Uporabljajte epruvete s temnomodrim zamaškom z dodatkom antikoagulanta (EDTA, heparin).

Posode za odvzem urina in drugih telesnih tekočin

Za naključni vzorec urina so ustrezni sterilni plastični lončki s pokrovom.

Ustrezno očiščene vrče za zbiranje 24-urnega urina dobite v Laboratoriju za specialne encime in elemente v sledovih (telefon: 01/522 2742).

Za analizo mikroelementov v tkivih ali drugih tekočinah je potreben predhoden dogovor o ustremnem protokolu odvzema z Laboratorijem za specialne encime in elemente v sledovih (telefon: 01/522 2742).

Za zbiranje, shranjevanje in transport biološkega materiala za elemente v sledovih **steklo in gumijasti zamaški niso primerni**, ker sproščajo ali vežejo nekatere elemente in s tem lahko vplivajo na njihovo koncentracijo v preiskovanih vzorcih.

Pripravil/i	Mag. a. Sešek Briški, spec. med. biokem., Mag. A. France-Štiglic, spec. med. biokem.		
Pregledal		datum	podpis
Odobril	Mag. a. Sešek Briški, spec. med. biokem.	Datum: 24.10.2013	podpis

Pregled predhodnih izdaj			
Izdaja	Opis sprememb/e dokumenta	Datum	
1	Inicialna izdaja	24.10.2013	