

PRAVILNO NAMEŠČENE NALEPKE S ČRTNIMI KODAMI NA EPRUVETE IN DRUGE VSEBNIKE ZA BIOLOŠKI MATERIAL ZA LABORATORIJ

1. Namen in področje uporabe

Navodilo je namenjeno naročnikom laboratorijskih storitev, kjer se pri naročilu natisnejo nalepke s črtnimi kodami za epruvete.

2. Postopek

Nalepko s črtno kodo pravilno namestite na epruveto na sledeč način:

- Nalepka mora biti nalepljena **vsaj 1 centimeter pod robom zamaška**.
- Nalepka naj bo nameščena tako, da je koda obrnjena **pokončno**, s **prvo črko priimka obrnjeno navzgor**,
- Nalepka mora biti nalepljena **naravnost**.
- Na epruveti mora biti nalepka s pravilno oznako barve zamaška (prva črka kratice označuje barvo zamaška):

RS - epruveta z rdečim zamaškom ali rumenim zamaškom

MP - epruveta s svetlo modrim zamaškom

ZP - epruveta z zelenim zamaškom

SP - epruveta s sivim zamaškom



TMK – epruveta s temno modrim zamaškom

VK – epruveta z vijoličnim zamaškom

U – urinska epruveta z rumenim zamaškom



- Na lončke za urin, blato ali likvor mora biti koda nalepljena pokončno, obrnjena navzgor s prvo črko priimka.

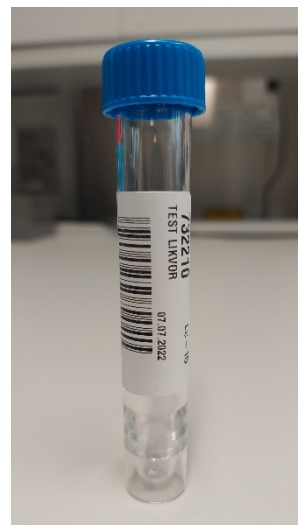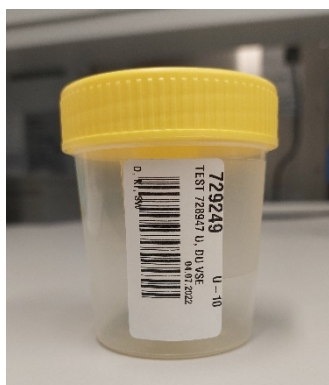

3. Opozorilo

V primeru, da opazite, da je odtis na etiketi slab, zmazan, manjkajo črke, priimek in ime čisto na robu etikete,... prosimo, da pokličete Help desk na telefonski številki 29-90, da tiskalnik ustrezno nastavi.